

Ochranná obličejová maska FFP2

RespiLAB™ powered by Hongyu®

Vysoce kvalitní a efektivní ochrana třídy **FFP2**. Respirátor se tvarem přizpůsobí pohybům Vašich úst, a tím zjednoduší dýchání a mluvení.

Unikátně navržená poutka umožňují polohování respirátoru na obličej. Velikost **vyhovuje většině typů obličejů, poskytuje účinnou filtraci** a zabezpečuje nízký odpor při dýchání. Tvarovatelná, zapašovaná nosní svorka pomáhá zajistit bezpečné nasazení a utěsnění. Prostorný a pohodlný vnitřek nezasahuje do zorného pole očí.

Způsob balení

Respirátory jsou již od výrobce zabaleny v **balení po 10 kusech**, kde je každý respirátor zabalen extra zvlášť **pro zachování hygieny** a možnosti respirátory řádně uchovávat například v batohu, tašce nebo kabelce.



Respirátor a Covid-19

Respirátor je vhodný pro zvýšení ochrany proti Covid-19. Na ochranu dýchacích cest jsou v takových případech určeny respirátory a ochranné pomůcky s typem filtru alespoň FFP2.

Respirátor s ochranným filtrem zachycuje aerosoly, prachové a smogová částice či pyl.

Respirátor je také doporučený Světovou zdravotnickou organizací (WHO), jako minimální standard ochrany.

Technická dokumentace

Uvedeno na trh, jako ochranný prostředek třídy III
Shoda posouzena na normu:
EN 149:2001 + A1:2009 - FFP2 NR

Shodu posoudila testovací laboratoř vedená v Evropské unii, jako oznamovací osoba CE č. 0598

Výrobce: Zhejiang Hongyu Medical Commodity Co.,Ltd., vyrobeno v Číně.

Velkoobchodní kontakt

Kartonové balení obsahuje 1200 jednotek respirátorů.

Kontakt: b2b@respilion.cz | umbrellaline 2010 s.r.o.
www.respilion.cz/pro-firmy/
www.respilion.cz
www.respilab.cz

Návod k použití

1. Rozevřete polomasku.
2. Nasaďte polomasku připevněním na obličej pomocí úchytlů za obě uši.
3. Přitlačte nosní svorku tak, aby zabraňovala proudění vzduchu.

Složení:

50% netkaná textilie, 20% melt-blown, 30% fukaná netkaná textilie

Rozsah použití:

Možno použít v různých prostředích. V mlžném a prашném prostředí, za špatného počasí, když padá sníh a dále na staveništi.

Upozornění:


1. Před použitím ověřte, že je polomaska v pořádku a použitelná pro daný účel.
2. Polomaska je jednorázová.
3. Používání polomasky přes vousy či vlasy, může způsobit úniky. Pokud je polomaska nasazena přes vousy či vlasy, nebude pravděpodobně dosaženo stanovené těsnosti.
4. Polomasku zlikvidujte a vyměňte, pokud dojde k jejímu poškození, nebo vyššímu dýchacímu odporu.
5. Nepoužívejte polomasku v silně znečištěném prostředí (včetně rizika výskytu výbušných plynů), prostředí s nedostatkem kyslíku, v požárním prostředí a při práci pod vodou.
6. Pacienti se srdečním, nebo jiným onemocněním (převážně respiračním), u kterých je nošení polomasky nekomfortní, by ji měli zlikvidovat a dále ji nepoužívat.
7. Masky označené „NR“ se nesmí používat pro více než jednu směnu.
8. Tento produkt nedodává kyslík. Používejte pouze v dostatečně větráných prostorech obsahujících dostatečný kyslík. Nepoužívejte polomasku, pokud je koncentrace kyslíku nižší než 19,5%.
9. Nepoužívejte v prostoru s hrozícím nebezpečím exploze.
10. Je přísně zakázáno používat polomasku po poškození obalu.

Aplikace:

1. Ruce a obličej by měly být před aplikací polomasky čisté.
2. Polomasku upevněte za uši po obou stranách obličeje.
3. Upravte nosní sponu stlačením tak, aby kopírovala kořen nosu.
4. Upravte polomasku tak, aby zakrývala nos a ústa.

Skladování:

V suchém prostředí s teplotou mezi -20 °C až + 60 °C. Prostedí nesmí obsahovat korozivní plyny a místnost musí být dobře větrána v relativní vlhkosti nepřesahující více jak 80% RH. Chraňte před slunečním světlem.

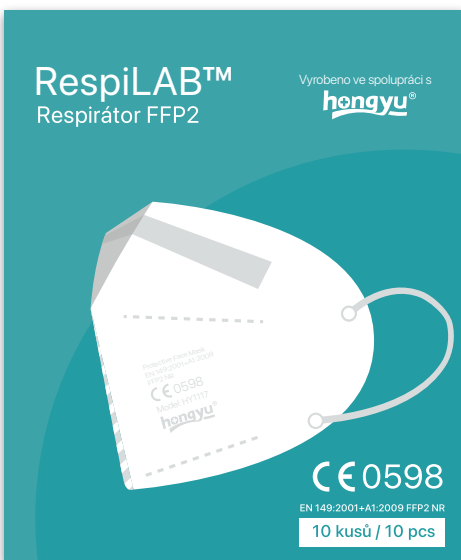

CE 0598

Subjekt notifikované osoby



Nepoužívejte opakovaně



Nepoužívejte je-li obal poškozen



Uchovávejte v suchu



Chraňte před slunečním světlem

CE č. 0598
SGS Firmko Oy
Helsinki, Finsko

Název výrobku: Ochranná obličejová maska třídy FFP2
Model č.: HY1117
Revize návodu: 27.1.2021, verze 1.0

Balení:

Kartonové balení:

GROSS: 11 Kg
NETTO: 10 Kg
Velikost: 57,5 x 29,5 x 64,5 cm
1200 kusů v krabici
120 balení v krabici

Varování: Řiďte se symbolem při skladování



Balení - 10 ks:

EAN: 8594181869768
Velikost: 150 x 45 x 125 mm



Balení 1 ks:

EAN: 8594181869751
Velikost: 150 x 125 mm



č. 0598
SGS Fimko Oy
Helsinki, Finsko

Vzor certifikátu kvality respirátoru v balení:

Produkt: Respirátor třídy FFP2 NR

Brand: Hongyu

Distributor: RespiLAB

Katalogové číslo: HY1117

Model: HY1117

Norma: EN 149:2001 + A1:2009

Šarže: viz balení

Datum produkce: viz balení

Datum expirace: viz balení

Datum kontroly kvality: viz balení

Rozměry: 16*10,5cm

Stav kontroly: Prošel

Výrobce: ZHEJIANG HONGYU MEDICAL
COMMODITY CO.,LTD

Výrobna: ZHEJIANG HONGYU MEDICAL
COMMODITY CO.,LTD

Adresa: No. 668 ChanHua Road Fotang Town
Zhejiang Province. Čínská lidová republika

Složení: 50% netkaná textilie, 20% melt-blown,
30% foukaná netkaná textilie

Otestováno oznamovacím subjektem

EU, CE č. 0598

www.respilab.cz | www.respilion.cz



č. 0598
SGS Fimko Oy
Helsinki, Finsko

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Prohlášení o shodě dle nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS

Dovozce:
umbrellaline 2010 s.r.o.
www.respilion.cz



Výrobce:
Zhejiang hongyu Medical Commodity Co., Ltd.

Adresa:
No. 668 ChanHua Road, Fotang Town Industrial
Functional Area, 322002 Yiwu City, Zhejiang
Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Oznamovací subjekt:
SGS Fimko Oy (č. 0598)
Takomotie 8, FI-00380 Helsinki
Finsko

Produkt(y):
Ochranná obličejová maska třídy FFP2

Model:
HY1117

Technická specifikace:
EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR
Přezkoušení na modul B a C2 provedl subjekt č. 0598
Na základě testu č.: SL52035284826801TX



n. 0598
SGS Fimko Oy
Helsinki, Finland

DECLARATION OF CONFORMITY

REGULATION (EU) 2016/425 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 March 2016 on personal protective equipment and repealing Council Directive 89/686/EEC

Importer:
umbrellaline 2010 s.r.o.
www.respilion.cz



Manufacturer:
Zhejiang hongyu Medical Commodity Co., Ltd.

Address:
No. 668 ChanHua Road, Fotang Town Industrial
Functional Area, 322002 Yiwu City, Zhejiang
Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Notified body:
SGS Fimko Oy (n. 0598)
Takomotie 8, FI-00380 Helsinki
Finland

Product(s):
Protective Face Mask FFP2

Model(s):
HY1117


Technical specifications:
EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR
Test for module B and C2 was performed by NB No. 0598
Report No.: SL52035284826801TX

Pod značkou/Brand:
RespiLAB™ powered by Hongyu®

Prohlášení o shodě je výhradní odpovědnost
výrobce Zhejiang hongyu Medical Commodity Co.,
Ltd.

Declaration of conformity is issued under the sole
responsibility of the manufacture Zhejiang hongyu
Medical Commodity Co., Ltd.

150x45x125mm

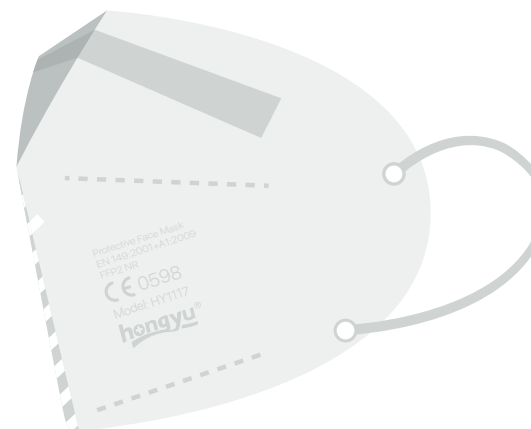

umbrellaline 2010 s.r.o.
ICO 03874851 | DIČ CZ03874851
www.respilion.cz